

Instrução de Uso

Escalpe para coleta de sangue a vácuo

1. Conteúdo

1.1 Modelo

Código	Descrição
FL5-E21G	Escalpe para coleta de sangue a vácuo 21 G - 50 UN/CX
FL5-E23G	Escalpe para coleta de sangue a vácuo 23 G - 50 UN/CX
FL5-E25G	Escalpe para coleta de sangue a vácuo 25 G - 50 UN/CX

1.2 Itens inclusos

Quantidade	Descrição
01 Caixa	50 unidades

ATENÇÃO: Este produto deve ser utilizado em conjunto com tubos para coleta de sangue à vácuo e com adaptadores para agulhas/tubos.

2. Finalidade de uso

Os **escalpes para coleta de sangue a vácuo** são utilizados para a coleta de amostras de sangue venoso e são utilizados em conjunto com tubos para coleta de sangue à vácuo e com adaptadores para agulhas/tubos.

Para uso profissional.

1.1 Efeitos secundários indesejáveis

Pode ocorrer vazamento de sangue pela capa de borracha da agulha.

Hematoma: para evitar os efeitos adversos, pratique as precauções universais de biossegurança e inspecione a ponta da agulha antes de puncionar o paciente.

3. Descrição do produto

Os **escalpes para coleta de sangue a vácuo** são compostos por aço ABNT 304 e plástico (PVC).

Escalpe estéril por óxido de etileno, livre de pirogênicos e com agulha siliconizada e trifacetada.

Produto de uso único.

- **FL5-E21GS:** Verde. Tamanho da agulha: 20x0,8mm
- **FL5-E23GS:** Azul. Tamanho da agulha: 20x0,6mm
- **FL5-E25GS:** Laranja. Tamanho da agulha: 20x0,5mm

4. Instruções de uso

1. Encaixar a agulha no adaptador. Não remover a capa plástica (transparente) de proteção da agulha.
2. Ajustar o garrote no braço do paciente para escolher a veia para realizar a punção.
3. Após a veia escolhida, limpar a superfície com álcool 70%.
4. Segurar o escalpe pelas asas flexíveis (os dedos devem estar em contato com a superfície antiderrapante da asa), retirar a capa plástica de proteção da agulha e inserir a agulha na veia do paciente. Se o escalpe estiver corretamente dentro da veia, uma pequena parte da cânula do escalpe preencherá com sangue.
5. Introduzir o tubo de coleta a vácuo no adaptador de forma centralizada e firme, até que o sangue percorra toda a cânula do escalpe e comece a preencher o tubo.
6. Quando o sangue parar de fluir para dentro do tubo, retirá-lo do adaptador e realizar a homogeneização (inversões), de acordo com a recomendação do fabricante. Caso tenha outros tubos a serem coletados, inseri-los um a um, seguindo os passos 5 e 6 quantas vezes forem necessárias, sempre seguindo a ordem recomendada dos tubos.

NOTA: Ocasionalmente pode ocorrer vazamento de sangue a partir da capa de borracha da agulha. Pratique as precauções universais de biossegurança para minimizar o risco de exposição.

7. Soltar o garrote assim que o sangue fluir para o tubo.
8. Após finalizar a coleta, retirar a agulha do braço do paciente e pressionar com algodão.
9. Descartar o escalpe em uma caixa própria para o descarte de materiais perfurocortantes.

5. Condições de armazenamento, conservação e manipulação

- Armazenar em local seco e fresco, longe da luz solar e líquidos cáusticos;
- Transportar em temperatura ambiente, em ambiente seco, longe da umidade e da luz excessiva;
- Descartar em caixa própria para o descarte de materiais infectantes e perfurocortantes;
- Validade: 24 meses.

6. Advertências e precauções

- Sempre antes de utilizar, verifique se a tampa de proteção está devidamente encaixada e íntegra para evitar contaminações;
- Não utilizar em caso de violação da embalagem;

- Proibido reprocessar;
- Produto de uso único;
- Descartar após o uso;
- Antes do uso, verificar a ponta da agulha.
- Caso tenha algum defeito, como rebarbas, não utilizar;
- Não utilizar após o prazo de validade descrito na etiqueta do produto;
- A utilização do produto deve estar em conformidade com as especificações relevantes do departamento médico ou requisitos regulamentares;
- Este produto deve ser utilizado apenas por profissionais da área da saúde treinados.

7. Responsabilidades



JIANGSU RONGYE TECHNOLOGY
CO., LTD
Endereço: Touqiao Town,
Yangzhou City, 225109, Juangsu
Province, China, República
Popular.

Detentor da notificação:

Firstlab Indústria Importação e Exportação de Produtos para Laboratórios Ltda.

Avenida Rui Barbosa, 5525 - Bloco B Galpões 1 e 2

São José dos Pinhais - PR. CEP: 83040-550

CNPJ: 27.089.709/0001-61

Telefone: (41) 3888-0888 / 0800 710 0888

E-mail: atendimento@firstlab.ind.br

Site: www.firstlab.ind.br

8. ANVISA

81628880028

9. Garantia

A Firstlab garante que este produto, em condições normais de uso e dentro do prazo de validade estabelecido, não apresenta defeitos. Esta garantia exclui danos resultantes de transporte, mau uso, descuido ou negligência. A responsabilidade da Firstlab referente à garantia do produto é limitada ao recebimento de evidências de que o defeito encontrado está dentro dos termos de garantia citados anteriormente.