

## INSTRUÇÃO DE USO

### Escalpe Para Coleta De Sangue a Vácuo (com dispositivo de segurança)

#### ■ 1. MODELOS APLICÁVEIS

Descrição	Modelo
Escalpe com dispositivo de segurança 21G. 50 un/cx.	FL5-E21GS
Escalpe com dispositivo de segurança 23G. 50 un/cx.	FL5-E23GS
Escalpe com dispositivo de segurança 25G. 50 un/cx.	FL5-E25GS

#### ■ 2. USO PRETENDIDO

Os **escalpes para coleta de sangue a vácuo** são utilizados para a coleta de amostras de sangue venoso e são utilizados em conjunto com tubos para coleta de sangue à vácuo e com adaptadores para agulhas/tubos.

Uso em diagnóstico *in vitro*.

#### ■ 3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os **escalpes para coleta de sangue a vácuo** são compostos por aço ABNT 304 e plástico (PVC) e estéreis por óxido de etileno.

**FL5-E21GS:** Verde. Tamanho da agulha: 20x0,8mm

**FL5-E23GS:** Azul. Tamanho da agulha: 20x0,6mm

**FL5-E25GS:** Laranja. Tamanho da agulha: 20x0,5mm

#### ■ 4. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1 - Encaixar a agulha no adaptador. Não remover a capa plástica (transparente) de proteção da agulha.

2 - Ajustar o garrote no braço do paciente para escolher a veia para realizar a punção.

3 - Após a veia escolhida, limpar a superfície com álcool 70%.

4 - Retirar a capa plástica de proteção da agulha. Inserir a agulha na veia do paciente e introduzir o tubo no suporte.

**NOTA:** Ocasionalmente pode ocorrer vazamento de sangue a partir da capa de borracha da agulha. Pratique as precauções universais de biossegurança para minimizar o risco de exposição.

5 - Soltar o garrote assim que o sangue fluir para o tubo.

6 - Após finalizar a coleta, retirar a agulha do braço do paciente e pressionar com algodão.

7 - Empurrar o dispositivo de segurança até ouvir um "click".

8 - Descartar o escalpe em uma caixa própria para o descarte de materiais perfurocortantes.

#### ■ 5. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e fresco, longe da luz solar e líquidos cáusticos.

#### ■ 6. PRECAUÇÕES

1 - Não utilizar caso a proteção individual esteja danificada ou não devidamente encaixada;

2 - Proibido reprocessar;

3 - Produto de uso único;

4 - Descartar após o uso;

5 - Antes do uso, verificar a ponta da agulha.

6 - Caso tenha algum defeito, como rebarbas, não utilizar;

7 - Não utilizar após o prazo de validade descrito na etiqueta do produto;

8 - A utilização do produto deve estar em conformidade com as especificações relevantes do departamento médico ou requisitos regulamentares;

9 - Este produto deve ser utilizado apenas por médicos treinados ou pessoal de enfermagem.

#### ■ 7. VALIDADE

Os escalpes para coleta de sangue a vácuo apresentam validade de 24 meses.

#### ■ 8. GARANTIA

A Firstlab Industria Importação e Exportação Produtos para Laboratórios Ltda garante que as agulhas múltiplas para coleta, em condições normais de uso, não apresentam defeitos de material pelo período de validade do produto. Esta garantia exclui danos resultantes de transporte, mau uso, descuido ou negligência. A responsabilidade da Firstlab referente à



garantia do produto é limitada ao recebimento de evidências de que o defeito encontrado está dentro dos termos de garantia citados acima. Todas as reivindicações em relação à garantia devem ser apresentadas de acordo com a validade de cada produto.

#### ■ 9. DISTRIBUÍDO POR

**Firstlab Indústria Importação e Exportação de Produtos para Laboratórios Ltda.**

Avenida Rui Barbosa, 5525 – Bloco B Galpões 1 e 2 –  
São José do Pinhais – PR – CEP: 83.040-550 | CNPJ:  
27.089.709/0001-61

**Telefone:** +55 (41) 3888.0888

#### ■ 10. REGISTRO ANVISA

81628880027

#### ■ 11. RESPONSÁVEL TÉCNICA

Ayná dos Santos Mendes | CRBio: 66.772/07-D